

Compressie bij borstoedeem: De Varodem oplossingen

3 december 2024

1

Even voorstellen....

- Aafke Saalmink, productspecialiste



2

Wie is Varodem?

- Fabriek in Zuid-België
- Varodem staat voor een combinatie van Varices en Oedeem
- Opgericht in 1965
- Een compleet aanbod in compressieproducten
- Staat voor kwaliteit, kennis en korte lijnen. De patiënt staat voorop!



3

Het Varodem assortiment

- Therapeutische elastische kousen
- VaroCare klittenbandsysteem
- Compressiebroeken & thoraxen
- VaroPad paddingmaterialen
- En nog veel meer.....



4


Borstoedeem: Compressie op de thorax

Hoeveel druk kan men verdragen op de romp?



5

Thorax, wanneer welk materiaal?

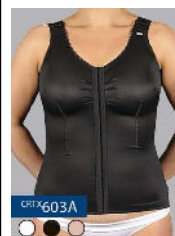

Niet-gebreide thoraxen.
In confectie en maatwerk
Voor mild tot gemiddeld oedeem
Bijv. Curetex



Gebreide thoraxen.
In maatwerk
Voor fors oedeem
Bijv. Juzo

6

Het Curetex materiaal

- Voelt als een tweede huid
- Ademend
- Comfortabel in gebruik
- Zachte en vlakke naden
- Breed inzetbaar
- Eenvoudig aan te meten
- Snel leverbaar
- Eenvoudig aan- en uittrekken

Samenstelling 77% Perlon en 23% Lycra

Drukklasse

Voor Curetex geldt geen drukklasse. Echter, de door het hulpmiddel gegenereerde druk komt overeen met een Ccl. 2

7

Indicaties

- Oedeemvorming in borst/schouder/flank/rug/buik
- Midline-lymfoedeem
- Mild tot gemiddeld oedeem
- Seroomvorming na operatie
- Na borstreconstructie
- Fibrose (i.c.m. VaroPad)



8

Modellen



Sportief model,
lage hals,
smalle banden



Degelijk model,
hoge hals,
brede banden



Herenmodel

Doorgaans zonder mouwen!

9

Opties

Kleuren



Hals



Brede of smalle schouderbanden



Kort of lang model




10

Opties

Haak-/oog



Pocket prothese

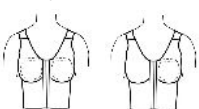

Verschillende cups of cup vlak

Rits



Katoenen ondersteuning



11

Productie

Curetex wordt geproduceerd in Denemarken, allemaal handwerk



12

Is het aanmeten moeilijk?

- Zeker niet! Raadpleeg onze online aanmeetvideo
- Slechts enkele meetpunten
- Ook confectieproducten verkrijgbaar (kort model)
- Ook papieren aanmeetinstructies beschikbaar

13

Pasvorm



14

Wat kan hier beter?



15

Combineren met pads



- Bevorderen lymfe-afvoer
- Fibrose voorkomen
- Aanvulling op oedeembehandeling
- Resultaat verhogen
- Compressie lokaal verhogen



16

Wat is VaroPad?

Compressierollen

5 mm dik en 4 meter lang

Maat 1: 8 cm breed

Maat 2: 10 cm breed

Maat 3: 12 cm breed

Maat 4: 16 cm breed



17

VaroBand



18

Oedeem in de arm?



Reduceren met een zwachtel, bijv. VaroCare klittenbandsysteem

Consolideren met een Varodem TEK

Confectie handcompressie

19

Hulp nodig?

- Bij een eerste of tweede keer komen wij helpen op locatie.
- De therapeut meet met ondersteuning van een Varodem productspecialiste
- Bij complexe posturen ondersteunen we ook



20

Gebruiksduur

Product	Levensduur
Curetex Bovenlichaam Bandage	4-6 maanden
Paddingmaterialen	3-4 maanden

21

Vergoeding Curetux en Padding

- Vanuit de basisverzekering (let op eigen risico)
- 2 tot max 3 stuks per jaar indien nodig
- Bij chronisch oedeem (langer dan 3 week)



22



Bestelwijzer compressie-hulpmiddelen 2025

VARODEM

23

Toelichtingsformulier Thoraxbandage

- Nieuw, compact toelichtingsformulier
- Specifieke formulier, geen overbodige info nodig
- Bestelformulier + handtekening arts (of losse verwijzing)
- Invullen max. 5 min.

Alle stappen invullen a.u.b.

1. Is er in de afgelopen 12 maanden een andere compressie BH geleverd? (evt. door andere partij)
 - Nee Ja, welke en hoelang gebruikt?
2. Wie brengt de compressie aan?
 - Zelfstandig / Mantelzorg
 - Thuiszorg
 - Anders, namelijk
3. Wie superviseert?
 - Medische specialist / huisarts
 - Thuiszorg
 - Oedeemtherapeut
4. Is er sprake van comorbiditeiten? (bijv. Diabetes, Aritmie/ vaatlijden of Hartfalen)
 - Nee Ja, welke?
5. Doel van compressie
 - Reductie Consolideren / behouden
6. Waarom zijn de zwachtels niet afdoende?

Het (zelf) zwachtelen van een thorax is een hoog complexe handeling die niet uitvoerbaar is door de patiënt of een mantelzorg.
7. Wat is de reden dat er gekozen is voor deze compressie BH? (verplicht uitgebreid toelichten in eigen woorden)

24

Onze boodschap



- Het aanmeten van een thoraxbandage (ook op maat) is niet moeilijk!
- Werk met paddings ter ondersteuning
- Het aanvragen en toelichten zo makkelijk mogelijk



25

Vragen?

Volg onze officiële kanalen:



26